

Gebrauchsanweisung Biologischer Mundschutz

Zweckbestimmung

Der Bio- Mundschutz dient der Filterung der Atemluft durch das Aufhalten bzw. Abtöten von Allergenen, Viren und Bakterien. Das Risiko einer Ansteckung mit Bakterien und Viren sowie des Auftretens einer Allergie kann somit wirksam verringert bzw. verhindert werden.

Überprüfung durch den Benutzer

Die Verpackung des Mundschutzes ist auf Unversehrtheit zu prüfen. Falls sich der Mundschutz bei Entnahme aus der Originalverpackung nicht in einwandfreiem Zustand befindet, Einwirkungen von Nässe und Schmutz, Verfärbungen oder Beschädigungen aufweist, darf er nicht verwendet werden.

Aufsetzanleitung



Der Benutzer des Mundschutzes muss mit der funktionsgerechten Handhabung gemäß Aufsetzanleitung vertraut sein.

Nach Überprüfung auf einwandfreien Zustand der Verpackung ist der Mundschutz der Verpackung zu entnehmen. Vor Gebrauch des Mundschutzes muss der Dichtsitz kontrolliert werden. Die Bebanderung des Mundschutzes ist elastisch selbsteinstellend und verfügt daher über kein Verstellsystem zur Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen. Es ist auf Verwendung der für den Träger individuell zutreffenden Konfektionsgröße zu achten. Zum Aufsetzen wird der Mundschutz in die Hand gelegt, mit den Ohrbändern nach oben. Der Mundschutz wird dann am Kinn angelegt und vor das Gesicht gehalten. Die Ohrbänder werden so hinter die Ohren gelegt, dass der Mundschutz vor dem Gesicht anliegt.

Anschließend ist der Dichtsitz zu überprüfen, indem der Mundschutz mit beiden Händen umschlossen wird bei gleichzeitig kräftigem Ausatmen. Bei seitlichem Luftaustritt und anderen undichten Stellen ist der Sitz des Mundschutzes zu korrigieren und der Dichtsitz erneut zu prüfen.

Bei Personen mit Bärten und Kotletten oder bei abweichenden Gesichtsformen ist unter Umständen ein Mundschutz mit größerer Passform zu wählen.

Verzeichnis der Warn-und Hinweisschilder

	Der Hersteller erklärt Konformität auf Basis der Richtlinie 93/42.
	Achtung Gebrauchsanweisung beachten.

Der Mundschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration und Eigenschaften der Schadstoffe in der Umgebungsluft nicht bekannt sind. Der Mundschutz schützt nicht vor biochemisch wirksamen und radioaktiven Stoffen, Brand- und Giftgasen. Der Mundschutz darf nur in ausreichend belüfteten Arbeitsbereichen verwendet werden, die genügend Luftsauerstoff enthalten. Der Mundschutz darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellt. Falls sich Atembeschwerden einstellen, bzw. Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten, ist der Aufenthaltsbereich unverzüglich zu verlassen.

Der Mundschutz darf nicht verändert oder zweckfremd verwendet werden. Der Mundschutz ist bei hohem Atemwiderstand und/oder hoher Verschmutzung zu waschen oder zu entsorgen.

Lagerung

Der Mundschutz ist trocken und sauber zu lagern. Er darf bei der Lagerung nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, da die Gummianteile in der Befestigung porös werden könnten.

Haltbarkeit

Der Mundschutz ist in Originalverpackung mindestens 6 Jahre haltbar, nach Öffnung 10 Monate.

Schutzgrad

Der Biologische Mundschutz erreicht seine Wirksamkeit auf zwei Wegen:

1. Abtöten von Bakterien durch Silberionen in einer textilen Schicht des Mundschutzes.
2. Filterleistung gegenüber Viren, Bakterien, Keimen und anderen Partikeln ab einer Partikelgröße von 0,3 µm.

Für beide Schutzwirkungen liegen Testberichte vor und können bei Bedarf angefordert werden.

Pflegehinweise

Die biologischen Atemschutzprodukte Take Cair sind gemäß Pflegeanleitung bzw. -symbolen mit handelsüblichen Textilpflegemitteln maschinenwaschbar. Zur Reinigung dürfen keine Fleckensalze oder dergleichen, wie auch oxidativ wirkenden Textilreiniger und Desinfektionsmittel eingesetzt werden.



Hersteller
Take Cair UG
Am Gewerbegebiet 5
95185 Gattendorf