


SCHNELLEINSTIEG* ROLLSTUHL PYRO START PLUS



1 Inhalt auf Vollständigkeit prüfen.




5 Beinstütze bis zur automatischen Arretierung nach vorne klappen.

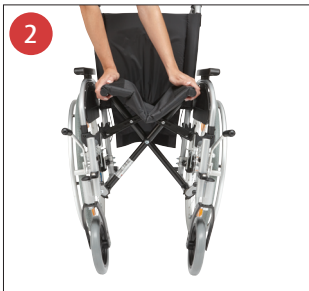

2 Mit flacher Hand auf das Sitzrohr drücken.



6 Der Pyro Start Plus ist jetzt einsatzbereit.

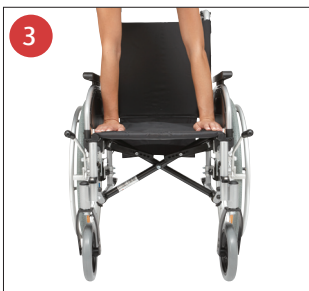

3 Sitzrohr muss vollständig eingerastet sein.



7 Zum Zusammenfallen des Rollstuhls, Sitzbespannung nach oben ziehen, bis der Stuhl vollständig gefaltet ist.



4 Handgriff betätigen und Beinstütze mit dem Führungsprofil in die Rahmenbohrung einführen.

* Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung